

Compact medicAL




Innovative
Sauerstoff-
Versorgung
für medizi-
nische An-
wendungen

Das Besondere an Compact medicAL ist der speziell entwickelte Zylinderkopf, der bereits alle für die medizinische Sauerstoff-Versorgung notwendigen Armaturen enthält. Der Kopf zeichnet sich durch eine sehr gute Funktionalität und Übersichtlichkeit aus. Dies bedeutet für den Arzt in der Praxis, im Krankenhaus und im Rettungsdienst mehr Sicherheit, einfache Handhabung und nicht zuletzt eine höhere Wirtschaftlichkeit.

Einfach, sicher, wirtschaftlich!

Compact medicAL 1000 und 2000

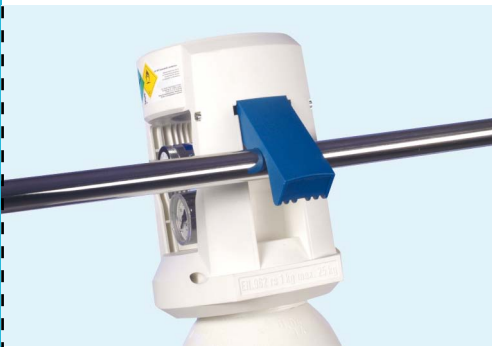

Einfach

Der anwenderfreundliche Zylinderkopf fasst alle erforderlichen Armaturen übersichtlich und zentral zusammen. Weitere praktische Details: Ein Tragegriff erleichtert den Transport, eine ausklappbare Aufhängevorrichtung bietet eine sichere Fixierung von Compact medicAL am Einsatzort bis hin zum Patientenbett. Der integrierte Fuß bietet sowohl bei dem 5-Liter-System mit 1.000 l Gasinhalt als auch bei dem 10-Liter-System mit 2.000 l Gasinhalt optimale Standsicherheit.



Sicher

Die spezielle Konstruktion des Kopfs schützt Armaturen und Anschlüsse und verhindert ein Wegrollen des Gaszylinders. Unfallgefahren wird so gezielt vorgebeugt. Ein Kontrollfenster im Zylinderkopf zeigt auf einen Blick, ob das Ventil offen oder geschlossen ist. Das Ventil lässt sich leicht durch eine halbe Drehung öffnen. Der Druckanzeiger informiert auch bei geschlossenem Ventil über den verbleibenden Sauerstoffvorrat. Der Sauerstoff lässt sich stets kontrolliert und exakt dosiert entnehmen.



Wirtschaftlich

Durch ein Ventil mit integriertem Druckminderer ist das System ohne Werkzeug sofort einsatzbereit. Drei Anschlüsse erlauben die gleichzeitige Sauerstoffentnahme z. B. für ein Beatmungsgerät und eine Atemmaske. Die erforderliche Sauerstoffmenge ist über den Dosierregler im Zylinderkopf exakt steuerbar, so dass sich der Inhalt effizient nutzen lässt.

Die einfache Handhabung optimiert Arbeitsprozesse im medizinischen Alltag. Compact medicAL ist ein zugelassenes aktives Medizinprodukt der Klasse IIa nach der EG-Richtlinie (93/42/EWG) über Medizinprodukte sowie § 13 Medizinproduktegesetz (MPG).

So einfach kann Sicherheit sein!

Kontakt

AIR LIQUIDE Medical GmbH
Luise-Rainer-Straße 5
40235 Düsseldorf
Fon: 0211 6699-0
Fax: 0211 6699-4881
medizin@airliquide.de



124007 03.13